

Manual de Uso del Bastón con Codera Fija

1. Introducción

Este manual proporciona instrucciones para el uso correcto de nuestro Bastón con Codera Fija y Empuñadura Anatómica diseñado para adultos mayores de talla baja. Este bastón es resistente, ligero y de altura ajustable.



2. Características del Producto

- Estructura tubular de aluminio de alta resistencia anodizado en color plata, bronce o negro
- Tubo de 2.5 cm de ancho mínimo, con un espesor mínimo de 1.5 mm
- Regatón de goma dura de 4 cm con placa metálica interior para máxima seguridad
- Codera de resina resistente, fija y abierta, diseñada para permitir un posicionamiento paralelo del antebrazo al bastón
- Empuñadura fija y suave, con diseño anatómico para mayor comodidad
- Inclinación del antebrazo de 25° a 30° para optimizar la postura al caminar
- Soporta un peso máximo de 100 kg
- Ideal para personas adultas de diferentes tallas, especialmente para adultos mayores de talla baja
- Ajustable en altura a partir de los 60 cm, para adaptarse a personas de talla baja
- Incluye un regatón antideslizante de repuesto para garantizar la seguridad a largo plazo

3. Uso Correcto del Bastón

- Asegúrate de que el bastón esté ajustado a la altura correcta. Al estar de pie con los brazos a los lados, la empuñadura del bastón debe estar al nivel de tu muñeca.
- Coloca tu brazo dentro de la codera y agarra la empuñadura del bastón. Tu antebrazo debe quedar paralelo al bastón.
- Al caminar, mueve el bastón hacia adelante al mismo tiempo que avanzas con el pie opuesto.
- Asegúrate de que el regatón de goma está completamente en contacto con el suelo antes de desplazarte al siguiente paso.

4. Mantenimiento y Seguridad

- Limpia el bastón regularmente con un paño seco para mantenerlo en buen estado.
- Verifica periódicamente el estado del regatón antideslizante. Si muestra signos de desgaste, reemplázalo con el regatón de repuesto incluido.
- No excedas la capacidad máxima de peso del bastón y evita usarlo para levantarte desde una posición sentada.

Si tienes alguna pregunta sobre el uso o el cuidado de tu nuevo bastón, no dudes en ponerte en contacto con nuestro servicio de atención al cliente. ¡Estamos aquí para ayudarte!