

## Instrucciones de Uso

Gracias por elegir nuestro bastón de aluminio de alta resistencia. Este bastón robusto, adaptable y fácil de usar es perfecto para adultos mayores de talla baja que requieren asistencia para la movilidad.

### Especificaciones

- Estructura tubular de aluminio de alta resistencia
- Anodizado color plata o bronce
- El tubo tiene un ancho de 2.5 cm y un espesor de 1.5 mm
- Regatón de goma duro de 4.5 cm de diámetro en la base, con placa metálica interior y antideslizante
- Cuatro patas de apoyo en el extremo distal
- Empuñadura antideslizante fija y anatómica con tope anterior de 3 cm de diámetro
- Resistente a fuerzas de 100 kg
- Incluye dos regatones antideslizantes de repuesto



### Ajuste de altura

- El bastón cuenta con perforados que permiten un ajuste desde los 65 cm aprox o más, ideal para personas de tallas bajas
- Estos agujeros están situados desde la empuñadura hasta la superficie inferior del regatón
- Asegura el tornillo de bloqueo después de ajustar la altura para garantizar un soporte seguro

### Uso del bastón

- Al utilizar el bastón, asegúrate de que el sujetador de empuñadura este mirando hacia atrás de la muñeca
- Asegúrate de que las cuatro patas de apoyo estén en contacto total con la superficie antes de desplazarte
- Evita utilizar el bastón en superficies mojadas o resbaladizas para evitar caídas

### Mantenimiento y almacenamiento

- Limpie el bastón regularmente con un paño seco
- Inspeccione regularmente las condiciones del regatón y reemplace si muestra signos de desgaste. Dos regatones de repuesto están incluidos para este propósito

### Recordatorio de seguridad

- Asegúrate de que el tornillo de ajuste de altura esté bien apretado antes de usar el bastón
- No excedas la capacidad máxima de peso del bastón de 100 kg
- Siempre consulta a un profesional de la salud o a un terapeuta sobre el uso correcto si no estás seguro
- No trates de usar el bastón para soportar todo tu peso cuando te levantes desde una posición sentada
- Siempre haz un seguimiento con un profesional de la salud si sientes dolor o molestias durante el uso

Si tienes alguna pregunta sobre este producto, no dudes en ponerse en contacto con nuestro servicio al cliente para obtener asistencia.