

Manual de Uso del Andador Articulado para Adultos de Aluminio Anodizado

1. Introducción

Este manual proporciona instrucciones para el correcto uso de nuestro Andador Articulado para Adultos de Aluminio Anodizado. Diseñado para mejorar la movilidad de aquellos que la necesiten, este andador es resistente, ligero, plegable y de altura ajustable.

2. Descripción

- Modelo de estructura tubular de aluminio anodizado de alta resistencia
- Color plata metálico
- Tubo de 3.0 cm de ancho, espesor 1,3 mm
- Diseño plegable
- Mecanismo articulado que permite apoyar y avanzar de forma simultánea
- Cuatro apoyos mediante regatones de goma dura de 4 cm, antideslizantes con placa de metal interior
- Incluye dos regatones antideslizantes de repuesto
- Regulable en altura: 8 niveles, cada 2.5 cm
- Empuñaduras fabricadas en goma suave para mayor confort y seguridad
- Proporciona dos funciones de marcha dependiendo de las recomendaciones de su terapeuta
- Soporte de peso máximo: 120 kg
- Dimensiones: Altura regulable de 70 a 96 cm, ancho 50 cm, profundidad 38 cm



3. Ajuste y Uso

- Asegúrate de que el andador esté completamente abierto y los apoyos del regatón estén seguros en el suelo
- Ajusta la altura de manera que las empuñaduras estén al nivel de tus caderas cuando estés de pie con los zapatos puestos
- Con las manos en las empuñaduras, tus codos deben estar ligeramente flexionados
- Para avanzar, levanta la estructura y colócala un paso por delante de ti, asegurándote de que los cuatro apoyos estén firmemente asentados antes de desplazarte
- Puedes optar por la función de marcha fija o avanzada, según la recomendación de tu terapeuta

4. Seguridad y Mantenimiento

- Nunca superes la capacidad máxima de peso de 120 kg
- Nunca uses el andador en baldosas húmedas o resbaladizas
- No uses el andador para levantarte desde una posición sentada
- Reemplaza los regatones gastados de inmediato para evitar resbalones y caídas
- Limpia regularmente las empuñaduras y la estructura del andador con un paño húmedo y un limpiador suave
- Al guardar el andador, siempre asegúrate de que esté plegado correctamente y guárdalo en un lugar seguro

Si tienes alguna pregunta sobre el andador o su uso, por favor, no dudes en contactar con nuestro equipo de servicio al cliente.